

Oxford Root PREP : Facile à utiliser

Oxford Root PREP est un conditionneur de canaux radiculaires basé sur le peroxyde de carbamide et l'EDTA. Il est idéal pour une préparation sécurisée du canal radiculaire.



Références produit

Oxford Root FILL System – Matériau d'obturation et de scellement temporaire ou permanent du canal radiculaire

Inclut : 2,5 ml / 3,9 g Minimix 4:1 Oxford Root FILL | 5 x Oxford Mix TIP(O) | 5 x Oxford Endo TIP
2 x 1 ml flacons Oxford Root SEAL | 5 x godets de mélange multi-puits | 5 x Oxford Endo BRUSH

Réf.	Produit
15-002	Oxford Root FILL System
12-007	Oxford Root FILL: 5 ml / 7,8 g Minimix 4 : 1 5 x Oxford Mix TIP(O) 5 x Oxford Endo TIP
22-001	Oxford Root SEAL: 35 x SingleMix à 0,15 ml 35 x Microbrush® peach
22-002	Oxford Root SEAL: 2 x 3 ml flacons 5 x godets de mélange multi-puits 50 x Oxford Endo BRUSH
01-002	50 x Oxford Mix TIP(O) pour Minimix 4:1 / 10:1
02-001	100 x Oxford Endo TIP pour Minimix
02-002	100 x Oxford Intra Oral TIP pour MixTIPs Minimix
03-001	50 x Oxford Endo BRUSH
02-008	50 x Oxford Transparent Luer Lock Cannulas
03-005	50 x Oxford Microbrush® peach

Introduction

Oxford Root FILL : Matériau d'obturation du canal radiculaire à prise duale

Oxford Root SEAL : Adhésif et apprêt de la dentine, auto-mordant à prise duale


Oxford Root PREP : Gel conditionneur de canaux radiculaires



Oxford Root FILL System

- Facile, rapide et pratique à appliquer
- Propriétés d'étanchéité excellentes
- Compatibilité optimale avec les procédures standards endodontiques ou d'adhésion lors de restaurations
- Biocompatibilité excellente
- Révision facile possible
- Bonne radio-opacité

© Copyright First Scientific Dental Materials GmbH V3 - 01.02.17

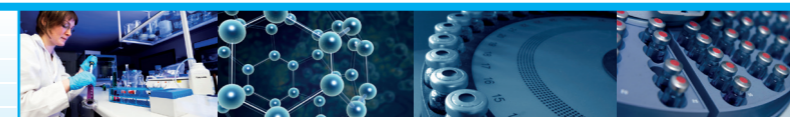

Oxford Root FILL System

Oxford Root FILL System : Le traitement du canal radiculaire simplifié et efficace


Oxford Root FILL System est une nouvelle technologie pour sceller et remplir le canal radiculaire. Il est idéal pour pouvoir continuer ensuite avec des matériaux en résines composites pour le scellement de tenons.

Oxford Root SEAL est un matériel auto-mordant facile à appliquer.

Oxford Root FILL permet d'obturer complètement le canal radiculaire et de prévenir une pénétration bactérienne. Il est souple et permet une révision pratique du canal radiculaire.



Étanchéité optimale du canal radiculaire

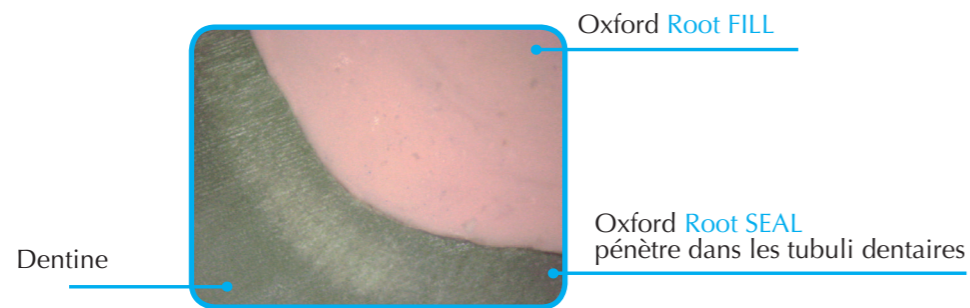

Caractéristiques techniques et bénéfices : Oxford Root SEAL

Caractéristiques techniques

- Matériel auto-mordant
- Viscosité adaptée

Bénéfices

- Procédure simple
- Nul besoin d'une étape supplémentaire de conditionnement
- Coule facilement



Oxford Root SEAL

Oxford Root FILL System

Caractéristiques techniques et bénéfices d'Oxford Root FILL


Caractéristiques techniques

- Caractéristiques de manipulation parfaites
- Compatibilité optimale avec les procédures standards de restaurations
- Force adaptée du matériau
- Matériau hydrophile avec une fluidité excellente et une expansion contrôlée
- Bactériostatique

Bénéfices

- Viscosité et consistance optimale
- Temps de travail confortable de 10 minutes
- À prise duale permettant le durcissement sur commande
- Possibilité de l'utiliser avec la Gutta Percha
- Se lie avec les composites pour la reconstitution de moignons
- Facile à enlever
- Étanchéité excellente et une adaptation parfaite aux murs des canaux radiculaires
- Sécurité pour le patient


Oxford Root FILL System : Souple et facile à retirer

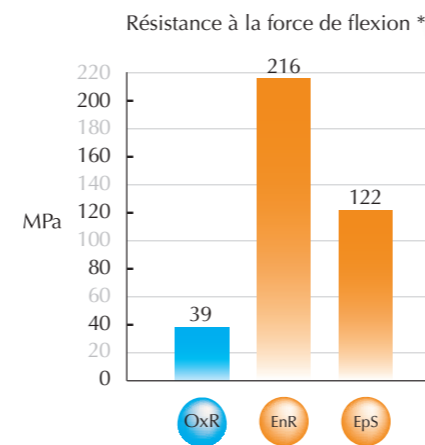

*Données disponibles sur demande

Oxford Root FILL System : Stabilité dimensionnelle volumétrique optimale pour une étanchéité excellente

Stabilité dimensionnelle volumétrique dans l'eau à 37 °C *

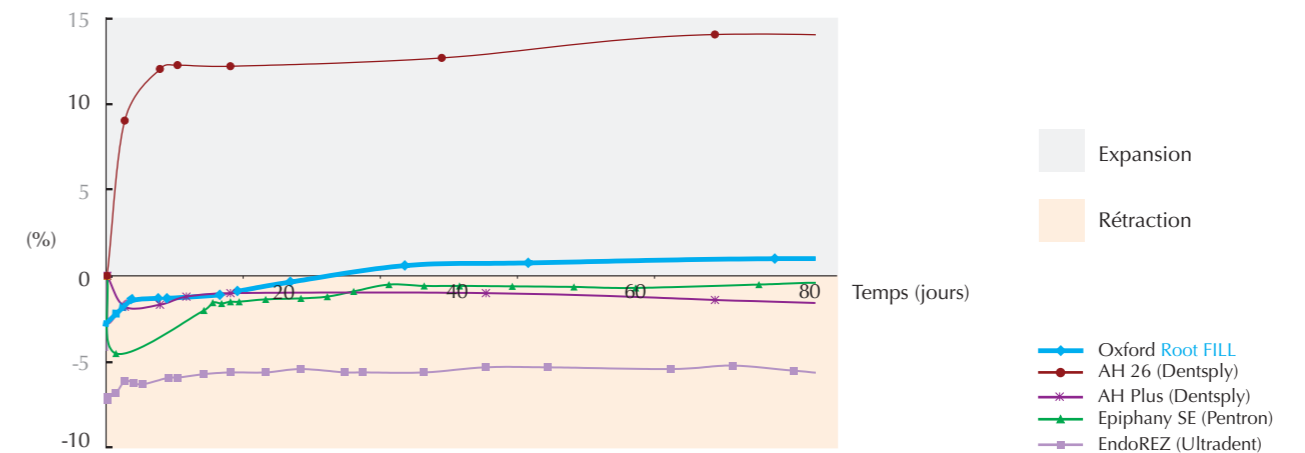

*Données disponibles sur demande